


VitaPulse 健康手环

全天候身体健康监测的新一代智能手环

产品型号: VP120

用户手册

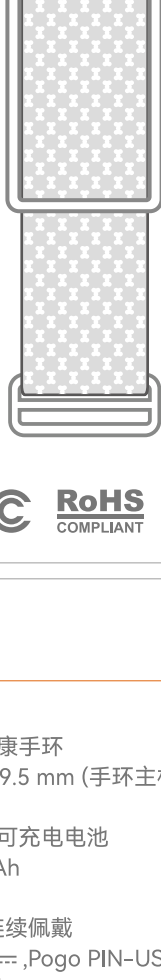

基本参数

产品型号: VP120
产品名称: 智能健康手环
产品尺寸: 28*42*9.5 mm (手环主机)
产品重量: 28 g
电池类型: 锂离子可充电电池
电池容量: 130 mAh
额定功率: 0.05 W
使用时间: 10天 连续佩戴
充电方式: DC 5V $\equiv$, Pogo PIN-USB Type-C
充电时间: 1.5小时
蓝牙版本: Bluetooth LE 5.3
数据储存: 64MB, 本地储存15天 / 云端无限存储
防水等级: WR30
工作温度: -20°C - 50°C
储藏温度: -20°C to 60°C
传感器类型: 心率血氧传感器PPG, 光学血压传感器
加速度计, 陀螺仪
CMIIT ID: 26J4453MF562



产品内容与配件



智能手环主机 x 1
本体

手环带子 x 1
配件

手环带扣环 x 1
配件

POGO PIN 手环充电线 x 1
配件

说明书 x 1
配件


产品说明



正面 背面

充电孔
血压传感器 (血压版配置)
心率与血氧传感器

* 请下载APP并安装完成, 手环与APP连接前要将手环摇晃2下, 进入配对模式。
* 手环主机的背面紧贴手腕表面, 充电孔朝外侧 手部小指方向

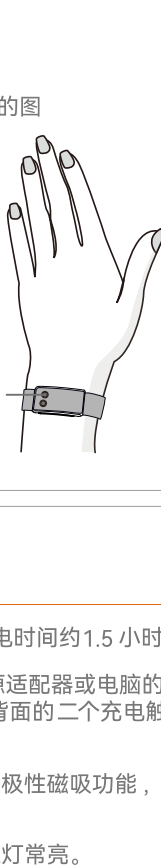


产品使用

- 将手环带穿过智能手环主机二边的带孔
- 注意手环带魔术粘朝上
- 将手环带扣件穿过与勾住手环的一边
- 完成装配后的图
- 装配完成后戴在手腕把手环带穿过扣环
- 利用手环带上带魔术贴反扣在手环带上
- 手环主机的背面紧贴手腕表面, 充电孔朝外侧 手部小指方向
- 完成戴在手腕上,可调整手环主机与扣环的位置

充电须知

- 当手环点亮过低时, 请及时充电充电时间约1.5小时。
- 将充电线的USB接口先接入5V电源适配器或电脑的USB孔,然后将充电线与手环主机背面的二个充电触点接触即可开始充电。
充电线与手环主机充电触点有正反极性磁吸功能, 可避免正负极反向。
- 充电过程中红灯闪烁, 充满电时红灯常亮。

* 请使用符合国家标准的USB充电适配器或充电宝, 避免使用劣质充电器。

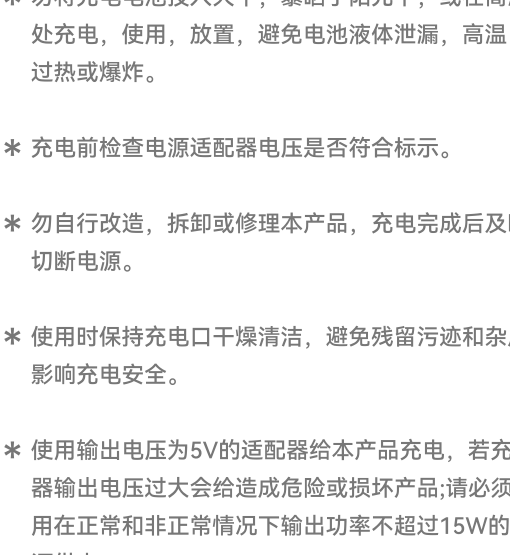

安全注意

- * 勿将充电电池投入火中, 暴晒于阳光下, 或在高温处充电, 使用, 放置, 避免电池液体泄漏, 高温, 过热或爆炸。
- * 充电前检查电源适配器电压是否符合标示。
- * 勿自行改造, 拆卸或修理本产品, 充电完成后及时切断电源。
- * 使用时保持充电口干燥清洁, 避免残留污迹和杂质影响充电安全。
- * 使用输出电压为5V的适配器给本产品充电, 若充电器输出电压过大会给造成危险或损坏产品;请必须使用在正常和非正常情况下输出功率不超过15W的电源供电。
- * 本产品内含不可拆卸电池, 如产品故障或电池电量持续低下, 请找专业人员处理。如因碰撞和摔落致使本产品受损产品受损, 请停止使用。

售后服务

故障排除

故障现象	可能的原因	解决办法
无法开机	电量过低	给产品充电
无法充电	充电线或电源适配器损坏	更换电源适配器
无法连接APP	电量过低	给产品充电
	没有打开配对模式	手环摇晃2下, 进入配对模式

一年有限保固

* 手环主机售出并确认收货之日起一年保固, 事故或人为造成的损坏不作保固。

* 配件不在保固范围内。

* 客服联系方式: <https://www.fitmonster.club> 或客服电话 400-083-1718



下载
Apple iOS版本



下载
安卓Android版本

使用iPhone手机, 请将系统更新到 iOS 12及以上版本, 扫描上方二维码跳转到健身怪兽 APP 下载中心, 选择相对应的硬件设备与产品型号, 会跳转到相对应的 APP 下载商店。
或在Apple App Store应用市场搜索“健身怪兽”或“Fit Monster”下载安装App或更新至最新版本。

使用安卓手机 Android 10及以上版本 MagicUI 2.0或 EMUI 8.0 及以上版本的荣耀手机或者 Android 10 及以上版本的其他手机扫描上方二维码跳转到健身怪兽 APP 下载中心, 选择相对应的硬件设备与产品型号, 会跳转到相对应的 APP 下载商店。

安装健身怪兽APP